

Anwendungsbeispiele zur modernen

WUNDVERSORGUNG

Lösungen



LAVANID® 1/2
Wundspüllösungen

LAVANID®
Wundgel

LAVANID®
Wundgel V+

LAVANID®
Verband



Beispiele für chronische Wunden

Patient: 42 Jahre, männlich

Begleiterkrankungen: Arterielle Hypertonie

Beschreibung: Wunde am rechten Schienbein nach Verkehrsunfall, Meshgraft nicht angegangen, Länge: 12 cm, Breite: 6,4 cm, leicht gerötete Wundränder, mäßige Exsudation, kein Wundschmerz, Wundalter ca. 6 Monate



Tag 0:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung, autolytisches Debridement mit Lavanid® Wundgel, Wundabdeckung mit Folienverband

Tag 67:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung, LAVANID® Wundgel, Wundabdeckung mit Polyurethanschaum

Tag 175:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung, Verband mit LAVANID® Wundgel

Patient: 64 Jahre, weiblich

Begleiterkrankungen: Arterielle Hypertonie, COPD

Beschreibung: Wunde am linken Unterschenkel, Länge: 12,3 cm, Breite: 8,7 cm, leicht gerötete Wundränder, mäßige Exsudation, mäßiger Wundschmerz, Wundalter ca. 3 Monate



Tag 0:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung und LAVANID® Wundgel, Wundabdeckung mit Polyurethanschaum

Tag 18:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung, Wundabdeckung mit Wunddistanzgitter, sterile Kompressen und Fixierung

Tag 63:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung, kein Verband

Beispiele für infizierte Wunden

Patient: 75 Jahre, männlich

Begleiterkrankungen: Arterielle Hypertonie

Beschreibung: Ulcus cruris, Wunde am rechten Innenknöchel, Länge: 5,4 cm, Breite: 5,2 cm, leicht gerötete Wundränder, mäßige Exsudation, kein Wundschmerz, Wundalter ca. 2 Jahre



Tag 0:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung, LAVANID® 2-Umschläge für 3 Tage, LAVANID® Wundgel V+, Wundabdeckung mit Polyurethanschaum, sterile Kompressen und Fixierung

Tag 34:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung, LAVANID® Wundgel V+, Wundrandschutz, Wundabdeckung mit Polyurethanschaum, sterile Kompressen und Fixierung

Tag 58:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung, LAVANID® Wundgel, Wundrandschutz, Wundabdeckung mit Polyurethanschaum, sterile Kompressen und Fixierung

Patient: 63 Jahre, weiblich

Begleiterkrankungen: Infektion mit Clostridium diff., Arterielle Hypertonie, bipolare Störung

Beschreibung: Großflächige Wunde am Gesäß. Patientin lag 4 Tage in der Wohnung im Stuhlgang, daraus resultierte ein Dekubitus Grad 3



Tag 0:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung, LAVANID® 2 Umschläge und LAVANID® Wundgel in der gebrauchsfertigen Spritze, Wundabdeckung mit sterilen Kompressen

Tag 91:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 2 Lösung und LAVANID® Wundgel in der gebrauchsfertigen Spritze, Wundabdeckung mit Polyurethanschaum

Tag 124:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung und LAVANID® Wundgel in der gebrauchsfertigen Spritze, Wundabdeckung mit Polyurethanschaum

Beispiele für Verbrennungswunden




Patient: 83 Jahre, weiblich

Begleiterkrankungen: Arterielle Hypertonie, COPD, Marcumartherapie, Vorhofflimmern

Beschreibung: Verbrennung 2. Grades am linken Oberschenkel,

Länge: 28 cm, Breite 26 cm, mäßige Exsudation, Wunde überwärmt und sehr schmerzhaft

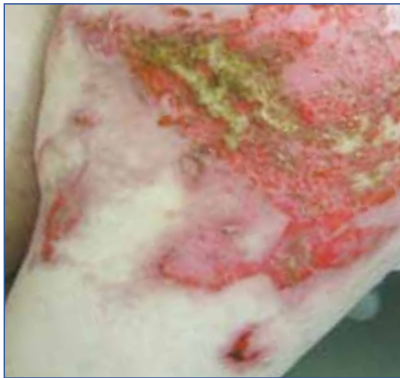

Tag 0:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung, LAVANID® Umschläge für 3-4 Tage. Danach LAVANID® Wundgel V+, Wundabdeckung mit Wunddistanzgitter, sterile Kompressen und Fixierung

Tag 6:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung und LAVANID® Wundgel V+, Wundabdeckung mit Wunddistanzgitter, sterile Kompressen und Fixierung

Tag 14:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung, gute Hautpflege, keine Wundabdeckung




Patient: 67 Jahre, männlich

Begleiterkrankungen: Synkope bei Herzrhythmusstörung

Beschreibung: großflächige Verbrennung 2. Grades an der rechten Bauchseite,

Länge: 19,8 cm, Breite 29 cm, mäßige Exsudation, Wunde heiß und sehr schmerzhaft.

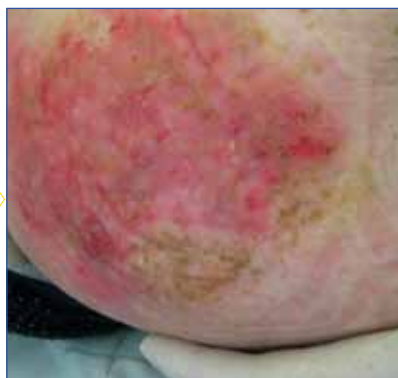

Tag 0:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung, LAVANID® Umschläge für 3 Tage, danach LAVANID® Wundgel V+, Wunddistanzgitter, sterile Kompressen und Fixierung

Tag 5:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung, LAVANID® Wundgel V+, Wunddistanzgitter, sterile Kompressen und Fixierung

Tag 12:

Therapie: Wundreinigung mit LAVANID® 1 Lösung, gute Hautpflege, kein Verband

Applikationsmöglichkeiten



Entnahme per Schraubverschluss und benetzen einer sterilen Kompresse zur Wundreinigung mit LAVANID® Lösung.



Aseptische Entnahme von LAVANID® Lösung per Spike und Spritze zur anschließenden Wundreinigung.



Aufbringen von LAVANID® V+ Wundgel per sterilem Spatel oder steriler Kompresse durch Entnahme aus der Tube.



Direkte Applikation von LAVANID® Wundgel aus der sterilen und gebrauchsfertigen 10 ml Spritze.

Lieferprogramm



Packungsgrößen:

LAVANID® 1	PZN	REF	LAVANID® 2	PZN	REF
1 x 125 ml	05901305	E14124	1 x 125 ml	05901280	E14224
20 x 125 ml	05901297	014124	20 x 125 ml	05901274	014224
1 x 250 ml	02178423	E14125	1 x 250 ml	02178529	E14225
10 x 250 ml	02178452	014125	10 x 250 ml	02178564	014225
1 x 1000 ml	02178475	E14127	1 x 1000 ml	02178570	E14227
6 x 1000 ml	02178498	014127	6 x 1000 ml	02178587	014227

Packungsgrößen:

LAVANID® Wundgel	PZN	REF
1 x 100 g	08837192	015274
1 x 40 g	13946724	015273

Packungsgrößen:

LAVANID® Wundgel V+	PZN	REF
1 x 100 g	10329497	015774
1 x 40 g	10813543	015773

Packungsgrößen:

LAVANID® Wundgel Spritze	PZN	REF
2 x 10 g	06122661	015272
12 x 10 g	02078785	015271

Packungsgrößen:

LAVANID® Wundgel V+ Spritze	PZN	REF
2 x 10 g	13576919	015772
12 x 10 g	13576925	015771

Packungsgrößen:

LAVANID® - Verband (1 VE = 10 Stück)	PZN	REF
10 x 10 cm	12388506	016310
5 x 5 cm	15202175	016305

Inhalt und Fallbeispiele

Sabine Laudes

Wundmanagement Klinikum

Frankfurt-Höchst GmbH



SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG

Zum Kugelfang 8 - 12

95119 Naila/Germany

+ 49 9282 937-0

+ 49 9282 937-9369

Export Department:

+ 49 9282 937-230

+ 49 9282 937-9785

info@serag-wiessner.de

www.serag-wiessner.de

