

Ringer-Lösung DAB 7

Spüllösung

Ringer-Lösung DAB 7 - Spüllösung ist eine auf die osmotischen Verhältnisse des Organismus abgestimmte, isotone und sterile Salzlösung.

Art und Dauer der Anwendung:

Zur Spülung bei chirurgischen Eingriffen sowie bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die eine Spülung bzw. Feuchthaltung nötig machen. Die Dauer der Anwendung ist auf den jeweiligen Eingriff begrenzt.

1000 ml enthalten:

Natriumchlorid 8,600 g

Kaliumchlorid 0,300 g

Calciumchlorid 2 H₂O 0,330 g

Wasser für Injektionszwecke

pH-Wert: 5,0 - 7,0

Theoretische Osmolarität: 309 mOsm/l

Hinweis zur Entsorgung:

Die Entsorgung nicht verwendeter Produkte oder von Abfallmaterial hat gemäß den spezifischen nationalen Vorgaben zu erfolgen.

Nur klare Lösungen verwenden!

Keine Zusätze mischen.

STERILE 1 2°C  **REF** 004287

Anwendungsgebiete:

Spülung zur internen und externen Anwendung

- Spülung im Wund- und Operationsfeld zum Freispülen und zum Feuchthalten des Gewebes
- Zur Wundspülung bei äußeren Traumen oder Verbrennungen
- Zur Spülung bei diagnostischen Untersuchungen
- Zum Befeuchten von Tüchern, Tamponaden und Verbänden
- Zum Spülen von Kathetern und Infusionsgeräten



Nicht wiederverwenden. Unmittelbar nach dem Öffnen verwenden. Nichtverbrauchte Reste verwerfen.



Nicht erneut sterilisieren! Kritische Änderungen der Gebrauchstauglichkeit möglich.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden!



Nicht zur Injektion oder Infusion verwenden.

15528AAE

1000 ml



**SERAG
WIESSNER**

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
95112 Naila / Germany