

Sichere und sanfte Punktlandung mit dem

# LAVANID®-Verband

Moderne  
Wundversorgung



Sterile, feuchte  
Wundauflage mit  
Polihexanid



150  
JAHRE  
1866 - 2016



SERAG  
WIESSNER

Bausteine für eine

# systematische Wundversorgung



## Optimale Wundversorgung:

Reinigung der Wunde mit LAVANID®-Produkten



Primäre Abdeckung mit einem LAVANID®-Verband




Sekundärverband



Fixierung

## Optimale Wundversorgung

Eine sorgfältige Wundreinigung ist Voraussetzung für die optimale Wundversorgung und Grundlage für einen raschen Heilungserfolg. Zu den LAVANID® 1/2 Wundspüllösungen und den LAVANID® / LAVANID® V+ Wundgelen reiht sich nun der LAVANID®-Verband perfekt ein. Mit dem neuen Produkt ist die primäre Wundversorgung bestens aufeinander abgestimmt. Somit bieten wir ein Wund-Therapie-System von der Reinigung bis hin zur primären Abdeckung von akuten und chronischen Wunden an.

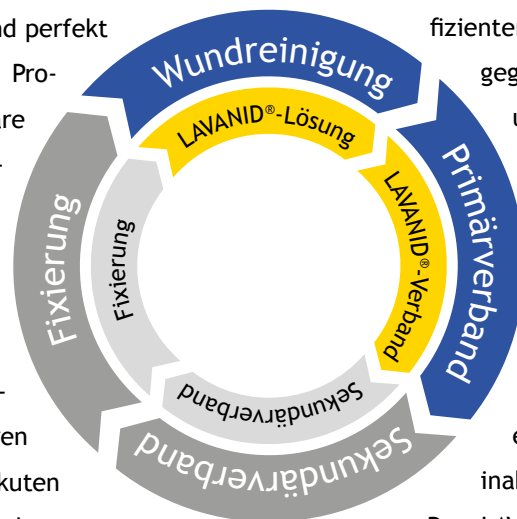

## Beschreibung und Produktprofil

Der LAVANID®-Verband ist ein steriler, feuchter, gebrauchsfertiger Wundverband mit Polihexanid. Nach einer gründlichen Wundreinigung mit LAVANID®-

Wundspüllösungen und ggf. Auftragen von LAVANID®-Wundgel wird der LAVANID®-Verband als Primärabdeckung verwendet. Der Primärverband besteht aus einem Biocellulose-Kern mit einem antimikrobiellen Komplex.

Dieser Komplex im Verband dient der effizienten Infektionsprophylaxe gegen Mikroorganismen und schützt vorbeugend gegen bakterielle und fungale Pathogene. Zelltrümmer und Pathogene werden vom LAVANID®-Verband effektiv absorbiert und inaktiviert.

Der LAVANID®-Verband reinigt die Wunde und schafft ein optimales Wundmilieu zur Neubildung von Granulationsgewebe bei akuten und chronischen Wunden. Wundkontaktnetze auf beiden Seiten verhindern ein Verkleben mit der Wunde und stellen einen schonenden Verbandswechsel sicher.



Gebrauchsfertige feuchte Wundauflage zur direkten Anwendung



Sehr gutes Zuschneiden, Drapieren und Tamponieren möglich



Zusätzliche Befeuchtung mit LAVANID® Wundgel möglich (bei trockenen Wunden)

## Anwendungsgebiete

Der LAVANID®-Verband wird bei akuten und chronischen Wunden mit Infektionsrisiko eingesetzt.

z. B. bei:

- Ulcus Cruris
- Diabetisches Fußsyndrom
- Dekubitus bis Grad 3
- Postoperative Wunden
- Verbrennungen bis 2. Grades
- Oberflächliche Wunden wie z.B. Spalthautentnahmestellen

## Sichere und vielseitige Anwendung

- Beidseitig anwendbar
- Sehr gutes Drapieren und Zuschneiden
- Gute vertikale Exsudataufnahme
- Schnelle und effiziente Entfernung von Wundbelägen
- Wundphasenübergreifende Anwendung

## Mit gängigen Sekundärverbänden kombinierbar!

Wundphase	Exsudation			
	trocken	normal	mittel	hoch
Entzündungsphase	LAVANID®-Verband	LAVANID®-Verband	LAVANID®-Verband	LAVANID®-Verband
	+ LAVANID® Wundgel + Folienverband oder + Semipermeable Wundauflage	+ LAVANID® Wundgel bei Bedarf + Folienverband oder + Schaumverband + Fixierung	+ Saugkomresse + Fixierung oder + Superabsorber + Fixierung	+ Superabsorber + Fixierung
Granulations- / Epithelisierungsphase	LAVANID®-Verband	LAVANID®-Verband	LAVANID®-Verband	LAVANID®-Verband
	+ Folienverband oder + Semipermeable Wundauflage	+ Sterile Gaze + Folienverband oder + Semipermeable Wundauflage	+ Saugkomresse + Fixierung oder + Superabsorber + Fixierung	+ Superabsorber + Fixierung

## Nutzen: LAVANID®-Verband

Gute vertikale Exsudataufnahme

Schnelle und effektive Wundreinigung

Einfache und sichere Handhabung

Vielseitig kombinierbar mit anderen Sekundärverbänden

KATEGORIE 2 gemäß G-BA Beschluss  
- auch in Zukunft erstattungsfähig -

### Bestellinformation:

Art.-Nr.	PZN	Größe	VE
016310	12388506	10 x 10 cm	10 Stk.



HAWEST Research AG,  
CH-6312 Steinhausen / Switzerland  
[www.hawest.com](http://www.hawest.com)

Vertrieb durch:



**SERAG  
WIESSNER**

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany



+ 49 9282 937-0



+ 49 9282 937-9369

*Export Department:*



+ 49 9282 937-230



+ 49 9282 937-9785



[info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)



[www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)