


Zur intraokularen Spülung

SERAG BSS SERAG BSS I+II

Lösungen



sterile
intraokulare
Spüllösungen

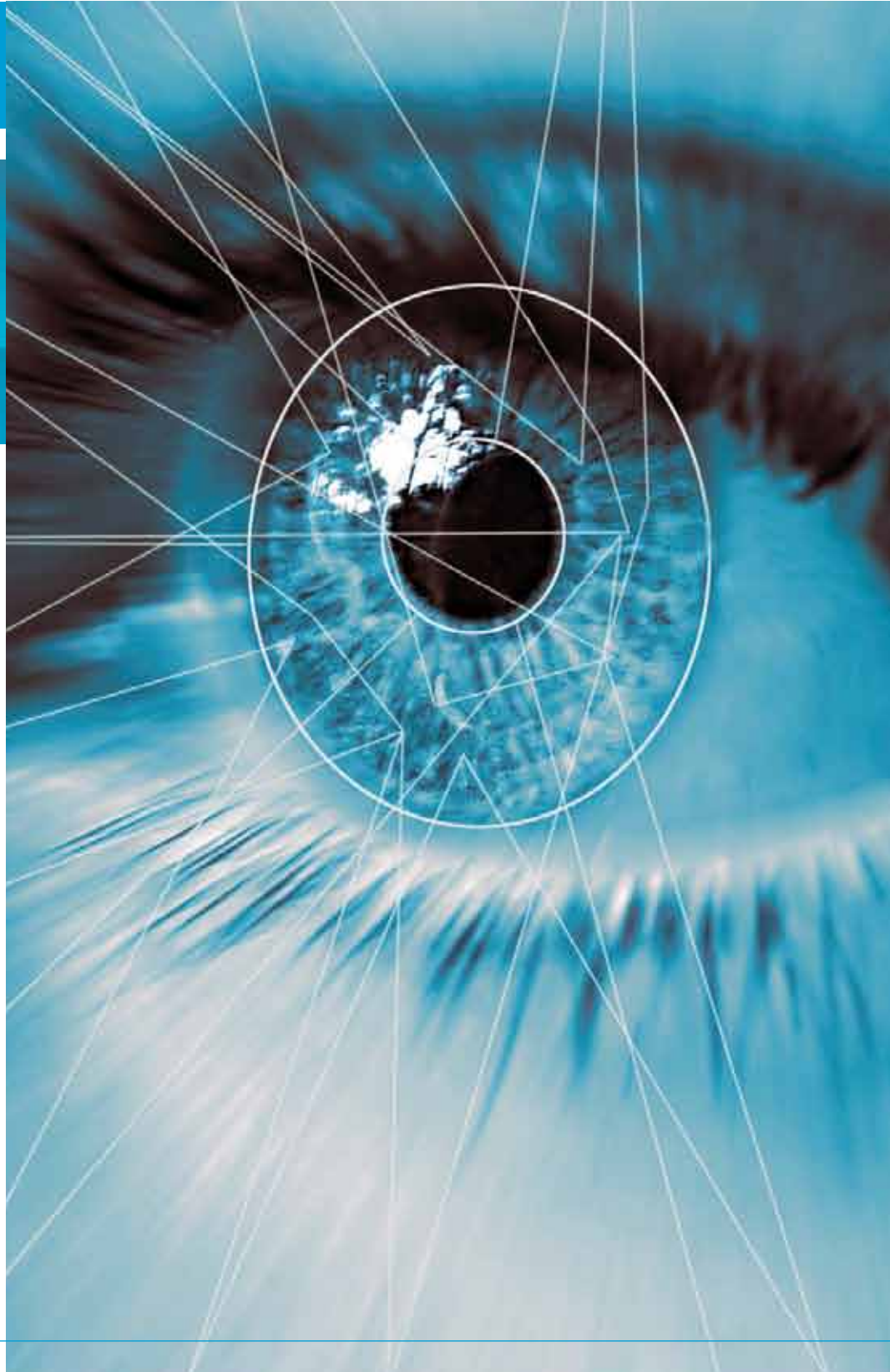

150
JAHRE
1866 - 2016



SERAG
WIESSNER

SERAG BSS



Beschreibung

Serag BSS ist eine physiologische, auf das Augenkammerwasser abgestimmte Salzlösung.

Zusammensetzung

Ionen: Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid, Acetat, Citrat
Wasser für Injektionszwecke

Anwendung

Serag BSS wird angewendet zur Spülung des Auges bei chirurgischen Eingriffen sowie bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die eine Spülung bzw. Feuchthaltung nötig machen. Die Dauer der Anwendung ist auf den jeweiligen Eingriff begrenzt.

Erstattungsfähigkeit *

Serag BSS ist in der Arzneimittel-Richtlinie Anlage V des Gemeinsamen Bundesausschusses als verordnungsfähiges Medizinprodukt gelistet und ist somit zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung verordnungs- und erstattungsfähig.

* gilt nur in Deutschland

Packungsgrößen Serag BSS

	PZN	REF
Klinikpackungen		
10 x 250 ml	09727270	012925
10 x 500 ml	05483894	012926
6 x 1000 ml	02178601	012927



SERAG BSS I+II



Beschreibung

Serag BSS I+II ist eine physiologische, mit Natriumhydrogencarbonat, Glucose und Glutathion angereicherte Salzlösung. Der Gehalt an Natriumhydrogencarbonat, der pH-Wert und die Ionenzusammensetzung von Serag BSS I+II schaffen die notwendigen Voraussetzungen für den Erhalt der elektrophysiologischen Aktivität der Netzhaut.

Anwendung

Serag BSS I+II wird als intraokulare Spüllösung bei chirurgischen Eingriffen im Auge, bei denen eine intraokulare Perfusion erforderlich ist, verwendet.

Zusammensetzung

Ionen: Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid, Hydrogencarbonat, Hydrogenphosphat
Glucose, Glutathiondisulfid, Wasser für Injektionszwecke

Zubereitung der gebrauchsfertigen Lösung unter aseptischen Bedingungen



1. Entfernen der Schutzvorrichtungen und desinfizieren der Gummistopfen. Aufsetzen des Transfer-Sets mit der gewellten Seite auf die kleine Flasche.



2. Entfernen der durchsichtigen Schutzvorrichtung.



3. Überleiten der Lösung.



4. Transfer-Set entfernen und Lösung durchmischen. Entfernen des oberen Etiketts. Nach dem Mischen ist die gebrauchsfertige Lösung innerhalb von 6 Stunden zu verwenden.

Packungsgrößen Serag BSS I+II

	PZN	REF
6 x 500 ml	01121119	015180

Kombipack, bestehend aus:

- Serag BSS I+II Teil I (480 ml)
- Serag BSS I+II Teil II (20 ml)
- Transfer-Set

1 x 6 Kombipackungen (500 ml)

150
JAHRE
1866 - 2016



SERAG
WIESSNER



SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany



+ 49 9282 937-0



+ 49 9282 937-9369

Export Department:



+ 49 9282 937-230



+ 49 9282 937-9785



info@serag-wiessner.de



www.serag-wiessner.de