

Bezpečné a jemné bodové přistání s krytím

LAVANID®

Moderní
ošetřování ran



Sterilní, vlhké
krytí ran s poly-
hexanidem



150
LET
1866 - 2016



SERAG
WIESSNER

systematického ošetřování ran



Optimální ošetření ran:

Vyčištění rány
produkty LAVANID®



Primární krytí LAVANID®



Sekundární krytí



Fixace

Optimální ošetření ran

Pečlivé vyčištění rány je předpokladem optimálního ošetření ran a základem pro rychlé a úspěšné hojení. Roztoky na vymývání ran LAVANID® 1/2 a gely na rány LAVANID® / LAVANID® V nyní perfektně doplňuje krytí LAVANID®. S tímto novým produktem je ošetření ran navzájem optimálně sladěné. Nabízíme tak systém pro ošetření ran od vyčištění až po primární krytí akutních a chronických ran.

Popis a profil produktu

Krytí LAVANID® je sterilní, vlhký obvaz na rány s polyhexanidem, připravený k okamžitému použití.

Po důkladném vyčištění rány oplachovými roztoky LAVANID® a případném nanesení

gelu na rány LAVANID® se jako primární krytí použije krytí LAVANID®.

Krytí LAVANID® obsahuje jádro z biocelulózy s antimikrobiálním komplexem.

Tento komplex obsažený v krytí slouží jako efektivní profylaxe infekcí způsobených mikroorganismy a preventivně


chrání před bakteriálními a fungálními patogeny.

Krytí LAVANID®

rozpouští biofilm a vytváří optimální prostředí pro novotvorbu granulační tkáně u akutních a chronických ran. Kon-

taktní síťovina na obou stranách zabraňuje přilepení

k ráně a zajišťuje šetrnou výměnu krytí.

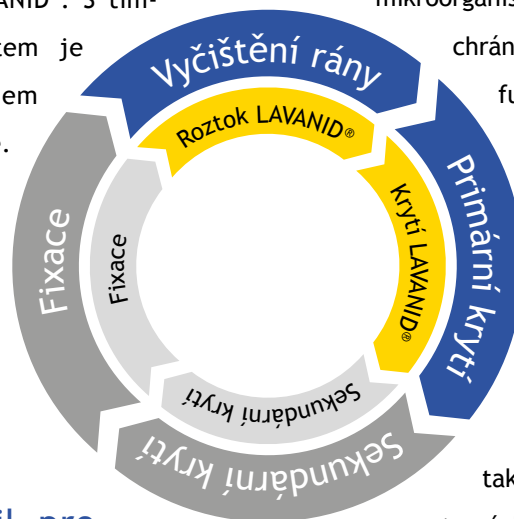



Vlhké krytí na rány, připravené k okamžitému použití



Lze velmi dobře přistříhnout, našasit a tamponovat



Je možné dodatečné zvlhčení gelem na rány LAVANID® (u suchých ran)

Oblasti použití

Krytí LAVANID® se používá u akutních a chronických ran s rizikem infekce.

Například:

- Ulcus cruris (běrcové vředy)
- Syndrom diabetické nohy
- Proleženiny 3. stupně
- Pooperační rány
- Popáleniny až 2. stupně
- Povrchové rány, například po odběru kožních štěpů

Bezpečné a všestranné použití

- Použitelné oboustranně
- Velmi snadná manipulace, možnost stříhání, netřepí se do rány
- Dobrá vertikální absorpce exsudátu
- Rychlé a efektivní odstranění biofilmu
- Možnost použití bez ohledu na fázi hojení rány

Přednosti: Krytí LAVANID®

Efektivní profylaxe infekcí

Rozpuštění biofilm a čistí ránu

Dobrá vertikální absorpce exsudátu

Snadné a bezpečné použití

Lze kombinovat s jiným běžným sekundárním krytím!

Fáze hojení rány	Tvorbá exsudátu			
	mírná	normální	střední	vysoká
Fáze zánětlivá	Krytí LAVANID® + gel na rány LAVANID® + fóliové krytí nebo + semipermeabilní krytí rány	Krytí LAVANID® + gel na rány LAVANID® v případě potřeby + fóliové krytí nebo + pěnové krytí + fixace	Krytí LAVANID® + savý obklad + fixace nebo + superabsorbér + fixace	Krytí LAVANID® + superabsorbér + fixace
Fáze granulace/epitelizace	Krytí LAVANID® + fóliové krytí nebo + semipermeabilní krytí na rány	Krytí LAVANID® + sterilní gáza + fóliové krytí nebo + semipermeabilní krytí na rány	Krytí LAVANID® + savý obklad + fixace nebo + superabsorbér + fixace	Krytí LAVANID® + superabsorbér + fixace

Informace pro objednání:

Výrobek č. PZN Velikost Prodejní jednotka

016310 12388506 10 x 10 cm 10 kusů




HAWEST Research AG,
6312 Steinhausen / Švýcarsko
www.hawest.com


Distribuce:





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany

SERAG s.r.o.
Na Vyhlídce 17
35002 Cheb

 354 439 644

 354 594 095

 serag@serag.cz

 www.serag-wiessner.cz