

Cleverer Lösung für optimierte Handhabung

Die iQ-Box

Chirurgisches
Nahtmaterial



sichere
Fadenentnahme

geschützte
Nadel- / Faden-
kombination



SERAG
WIESSNER



Vorteile

Optimierte Handhabung

Geringerer Memoryeffekt

Leichte Entnahme

Schnelle Verarbeitung

Sterile Verpackung

Transparente Verpackung

Vielzahl von Fadenstärken
und Nadelgrößen

Übersichtliche Kennzeich-
nung

Einfach. Clever. Die iQ-Box

Clever ist, was besser ist. Die iQ-Box erfüllt ihr Namensversprechen.

Das Verpackungskonzept ist ganz auf die optimierte Handhabung von Nadel- und Fadenmaterial ausgelegt. Dafür wurde die Entwicklung der Verpackung von Anfang an den praktischen Bedürfnissen im OP-Betrieb angepasst. Die leichte, intuitive Anwendung wie auch die sterile und transparente Verpackung sind grundsätzliche Stärken. Dadurch wird eine Entnahme ohne Umgreifen der Nadel ermöglicht. Darüber hinaus bietet die iQ-Box einen bemerkenswerten Vorteil: einen verringerten Memoryeffekt.

Merklich weniger

Jedes Fadenmaterial passt sich in seiner Form dem Fadenträger an und be-

hält diese nach der Entnahme bei. Dabei spricht man vom Memoryeffekt. Starke Schlaufen bergen jedoch das Risiko einer Verknotung. Die iQ-Box bietet hier intelligente Abhilfe. Die Verpackung ist so aufgebaut, dass durch eine leicht gestraffte Entnahme der Memoryeffekt beim Faden verringert wird. Zudem verhindert eine neuartige Wickeltechnik ein Verknoten.

Umfassend clever

Die iQ-Box wird für eine Vielzahl von Nadel-Fadenkombinationen erhältlich sein. Sie ist geeignet für resorbierbares und nicht resorbierbares Fadenmaterial, ebenso für geflochtene (multifile) und monofile Fäden. Hier ist der Memoryeffekt deutlicher ausgeprägt.




Leichtes Öffnen der Deckkassette



Sicheres Greifen der Nadel



Straffe Entnahme

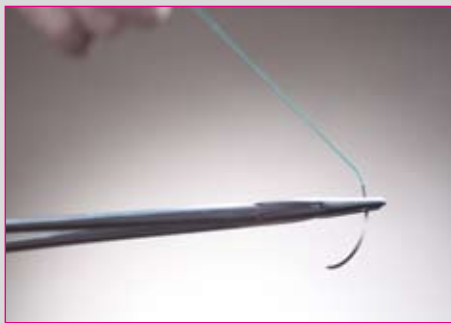


Sofortige Verarbeitung durch Operateur

Auf einen Blick


Der Vorteil der iQ-Box ist bereits auf den ersten Blick ersichtlich. Durch die besondere Packungsgestaltung sind Nadel und Faden sofort zu erkennen. Die weiteren Vorteile offenbaren sich direkt in der Handhabung.

- Sterile Entnahme
- Einfaches Handling und zuverlässige Fadenskonsistenz
- Eine merkliche Verbesserung - mit deutlich reduziertem Memoryeffekt
- Scanfähiger Barcode auf Fadenträger und Sterilverpackung

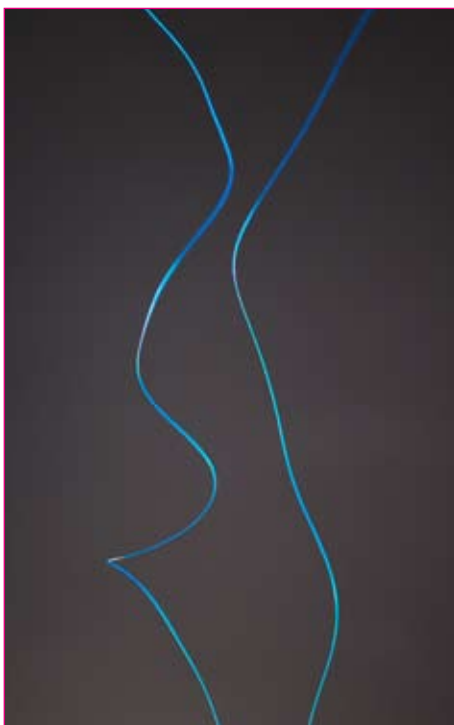

Faden links = herkömmliche Verpackung; Faden rechts = neue iQ-Box - deutlich verringert Memoryeffekt


Zahlen / Fakten

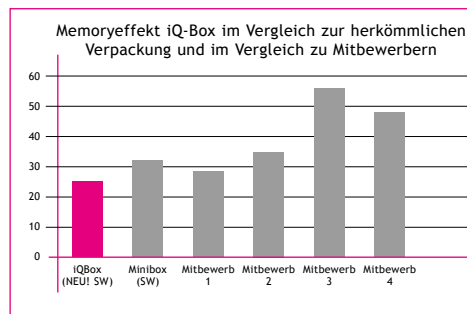


Im Vergleich mit herkömmlichen Fadenträgern und Verpackungssystemen zeigen sich die Vorteile der iQ-Box. Schnell und sicher zu entnehmen, einfach und effizient in der Handhabung.





SERAG-WIESSNER KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de