


Sicherheit bei der Mitralklappenrekonstruktion

SERAMON[®]

CHORDAE LOOP


Chirurgisches
Nahtmaterial

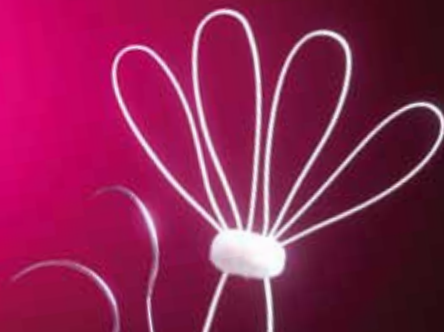

150
JAHRE
1866 - 2016



SERAG
WIESSNER

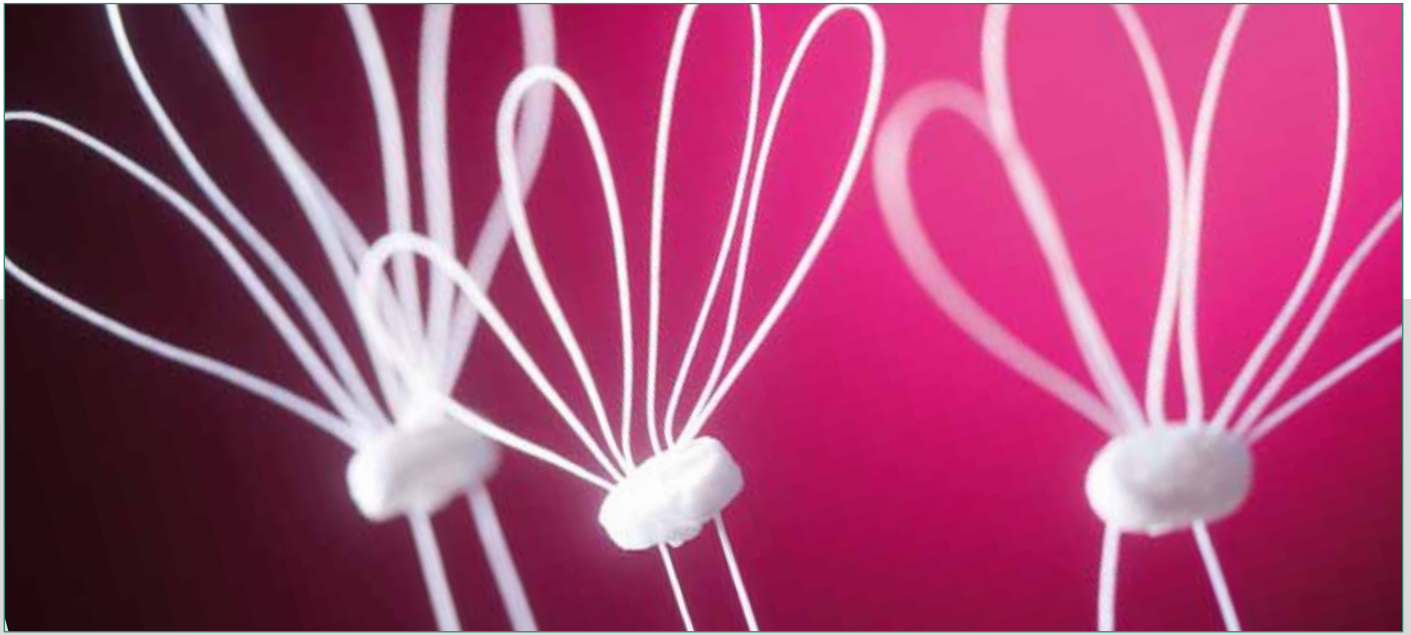

CHORDAE LOOP aus PTFE

Ideal zur Mitralklappen-
rekonstruktion

Innovatives Fadenmaterial
aus PTFE (Polytetra-
fluorethylen)

Ovaläre Pledgets für eine
bessere, anatomische
Anpassung

Höchste Stahlqualität
der Nadeln

Optimale, konstante Faden-
längen - auch für große
oder adipöse Patienten
geeignet

SERAMON® CHORDAE LOOP ist ein nicht resorbierbares Implantat zur Mitralklappenrekonstruktion und Reparatur der Chordae tendineae.

Das vorgefertigte Implantat bietet höchste Sicherheit durch exakte, reproduzierbare Kontrollen aller entscheidenden Größen wie Schlaufenlänge, -festigkeit und Nadelabzugskraft.

Das Implantat, basierend auf einem durchgehenden PTFE-Faden, besteht aus vier gleich langen Schlaufen, die durch ein PTFE-Pledget verbunden sind. Das Pledget mit 4er-Loop wird auf den Papillarmuskel genäht, wobei ein zweites Pledget als Nahtwiderlager dient. Die Schlaufen werden mit Nähten befestigt.

Der Vorteil des SERAG-WIESSNER-Implantats besteht darin, dass wir für unsere Implantate nur beste Qualität verwenden:

- Die Nadeln sind aus 300er Stahl gefertigt. Das ist bei chirurgischem Stahl die höchste Qualitätsstufe.
- Das Fadenmaterial SERAMON® ist komplett aus PTFE hergestellt. Es hat eine

sehr geringe Reibungskoeffizienz, ist biologisch inert und besonders gewebeverträglich.

- Das Material mit monofilem Fadenaufbau besticht darüber hinaus durch eine extreme Flexibilität, welche Fadenmemory und Knickgefährdung des Fadens deutlich reduziert.
- Der Faden ist extrem weich und geschmeidig, wodurch er sich leichter handhaben lässt.
- Die Knoten der Fadenschlaufen sind im Pledget versenkt, um den Strömungswiderstand zu minimieren.
- Die Pledgets werden aus reinem PTFE-Filz hergestellt und gegen das Ausfransen einzeln manuell bearbeitet. Sie sind oval, um sich den anatomischen Gegebenheiten besser anzupassen und Thrombosen vorzubeugen.

Vergleich Pledgets:



Pledget Wettbewerb



Pledget SERAG-WIESSNER



Öffnen der Verpackungslasche


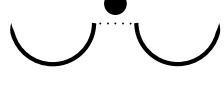


Entnahme der Nadel und der Loops



Entnahme des Pledgets aus der Verpackung

Lieferprogramm SERAMON® CHORDAE LOOP

Nadel- bezeichnung	Material	Maße der Pledgets/ mm	Fadenstärke/ USP	Fadenstärke/ EP	Fadenlänge/ Meter	Loopgröße / mm	Abgabemenge/ Stück	Bestell- Nummer
DR-15 +DR-15 	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 10	6	MECL10B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 12	6	MECL12B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 14	6	MECL14B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 16	6	MECL16B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 18	6	MECL18B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 20	6	MECL20B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 22	6	MECL22B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 24	6	MECL24B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 26	6	MECL26B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 28	6	MECL28B
	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 30	6	MECL30B
	HR-17 +HR-17 	SERAMON ungefärbt	6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 10	6
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 12	6	MECL12A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 14	6	MECL14A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 16	6	MECL16A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 18	6	MECL18A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 20	6	MECL20A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 22	6	MECL22A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 24	6	MECL24A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 26	6	MECL26A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 28	6	MECL28A
SERAMON ungefärbt		6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 30	6	MECL30A

Nähte zum Fixieren der Schlaufen

HR-17		SERAMON ungefärbt	-	3/0	2	1 x 0,90	-	24 MEO20441C
-------	---	-------------------	---	-----	---	----------	---	--------------


Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!


Bitte fordern Sie weitere Informationen zum SERAMON® Nahtmaterial an und besuchen Sie die entsprechenden Seiten unserer Homepage.

150
JAHRE
1866 - 2016





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de