

Bewährtes zielgerichtet weiterentwickelt

# SERAPRO® VR

Instrumente



für die  
retropubische  
Anwendung

vereinfachtes  
Handling führt  
zum Ziel



**SERAG**  
**WIESSNER**

## Vorteile von SERAPRO® VR

- wiederverwendbare Instrumente MADE IN GERMANY aus chirurgischem Stahl
- leicht zu zerlegen und zu reinigen
- Sicherheitsfixierlement gewährleistet sichere Instrumentenübergabe
- Instrumentarium beliebig erweiterbar

- Auswahl an verschiedenen Ahlen (Länge, Spitze, Biegung, Stärke) mit einem Griff kombinierbar
- Fortführung der bewährten SERASIS®-Einlegetechnik und Erweiterung auf eine durchgängige retropubische Passage in gleicher Richtung

## Vorbereitung Instrument



1. Fixierelement einsetzen



2. Fixierelement um 90° drehen (sichern)



3. Fixierelement anheben - Ahle einführen



4. Fixierelement nach unten drücken

## Anwendung



1. Retrosymphysäre Passage



2. Fixierelement anheben - Ahle freigeben



3. SERASIS®-Band mit 3 cm Überstand in Öse einführen



4. Passage in gleicher Richtung fortführen



**SERAG  
WIESSNER**

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8-12  
95119 Naila/Germany

+ 49 9282 937-0

+ 49 9282 937-9369

info@serag-wiessner.de

www.serag-wiessner.de